

Попередження

Зверніться до Вашого стоматолога для консультації протягом перших трьох місяців використання цього продукту.

Не використовуйте у наступних випадках:

- Більше трьох місяців без консультації стоматолога.
- Більше 8 годин на день.
- Як спортивну захисну капу. Ця продукція призначена для протидії вертикальному тиску, але не захищає від ударної дії.
- Якщо Вам не виповнилося 18 років.
- Якщо у Вас немає декількох зубів або є розхитані зуби.
- При болю в нижньощелепному суглобі (ТМС), діагностованому стоматологом, або при хрускоті у щелепах.
- При болю, викликаному внаслідок скреготіння зубами, або при зубному або щелепному болю іншого походження.
- Якщо у Вас є зубні імплантати, або Ви носите зубні протези, брекети чи інші ортодонтичні пристрої.

Перед використанням капи проконсультуйтеся зі стоматологом якщо у Вас є:

- Серйозні проблеми зі здоров'ям або серйозні порушення дихальної функції.
- Виразки у ротовій порожнині, кровоточивість ясен або будь-які захворювання ясен.
- Незапломбовані зуби або пломби, що випали.
- Труднощі при жуванні, щелепний, зубний або лицьовий біль.
- У Вас немає одного або більше зубів.

Припиніть використання і проконсультуйтеся зі стоматологом, якщо:

- У Вас виникають хворобливі відчуття, змінюється зовнішній вигляд ясен, з'явилася кровоточивість ясен або будь-яка інша реакція у роті.
- У Вас з'являється щелепний біль, зубний біль, вушний біль, головний біль, оніміння шиї або хрускіт у суглобах при використанні цього продукту.
- Зазначені симптоми зберігаються більше місяця використання.

- Капа легко випадає у Вас з рота.
- Капа заважає дихати, створює дискомфорт або викликає блювотні позиви.
- Зміна прикусу зберігається більше кількох хвилин після зняття капи.

Користувачі можуть відчувати задуху або нудоту під час використання цього продукту. Якщо це сталося, припиніть користування та зверніться за медичною допомогою.

Відвідуйте стоматолога кожні 6 місяців.

Цей продукт не містить бісфенолу А та латексу.

Також рекомендуємо



0800 500 362
info@swisstrade.com.ua
www.swisstrade.com.ua

DenTek Oral Care, Inc., Teppitau, NY 10591

Входить до групи компаній Prestige Consumer Healthcare
©2020 Торгове оформлення належить DenTek Oral Care, Inc.
Всі права зарезервовано. Виготовлено в Індії.
Патент США №10,624,779 DKUS136601



READY-FIT™



ЩОДЕННА ГІГІЄНА ТА КОМФОРТ
**ВИТРАТНІ
ЗУБНІ КАПИ**

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ

Дізнайтеся більше про зубні капи DenTek™
на SwissTrade.com.ua

Про Вашу зубну капу

Розроблена для комфортного захисту від нічного скреготу зубів або Бруксизму:

- ✓ Демпфування і розділення зубів
- ✓ Зниження пошкодження зубів

Просто розмістіть стоматологічну Витратну зубну капу у ротовій порожнині на верхні або нижні зуби, в залежності від того, як Вам зручніше. Утримуючий обод повинен розміщуватися між передніми зубами і губою, а трубочки для прикусу на коріних зубах. Закрийте рот, акуратно розмістіть зуби на трубочках для прикусу і розслабтеся.

Для найкращих результатів

- **НЕ одягайте декілька кап одночасно.**
- Прочитайте і дотримуйтесь інструкцій по установці Витратної зубної капи.
- Утилізуйте після використання.
- Якщо Вам потрібна допомога, відвідайте www.swisstrade.com.ua або зателефонуйте за тел. 0 800 500 362 з 8:00 до 17:00 у робочий час і один з наших навчених фахівців Вам допоможе.
- Вам може знадобитися деякий час, щоб звикнути до носіння зубної капи, тому надягайте її за годину до сну.

Щоденна гігієна та комфорт

Кожна капа поставляється в індивідуальній упаковці для збереження чистоти.

Припасування Витратної зубної капи здійснюється на ВЕРХНІ або НИЖНІ зуби БЕЗ необхідності її нагрівання та формування.

Отвори в утримуючому ободі
Забезпечують слиновідтік

Гнучкі трубочки для прикусу
Амортизують тиск і розділяють зуби

Комфортна утримуюча стінка
Утримує капу на місці

